


Technisches Datenblatt und Planungshilfe

Modell // mikro //

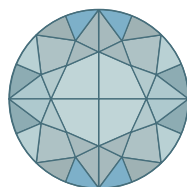

DIAMANTLiFT

Modell mikro

Geräteansicht Modell // mikro //




Unser Modell mikro ist der kleinste Lift in unserem Sortiment. Dieses Gerät passt in fast jedes Bad und ist überaus schick. Um diesen Lift wird man Sie beneiden.

Dieses Datenblatt ist eine Hilfe, um zu prüfen, ob unser Lift für Ihr Bad geeignet ist. Die nachfolgenden Zeichnungen helfen Ihnen den Platzbedarf des Liftes in Ihrem Bad zu ermitteln.


Tipp: Wählen Sie den Standort für den Lift ca. 5 cm über dem Wannenrand.

Technische Zeichnung

Geräteansicht von vorne mit Maßangaben

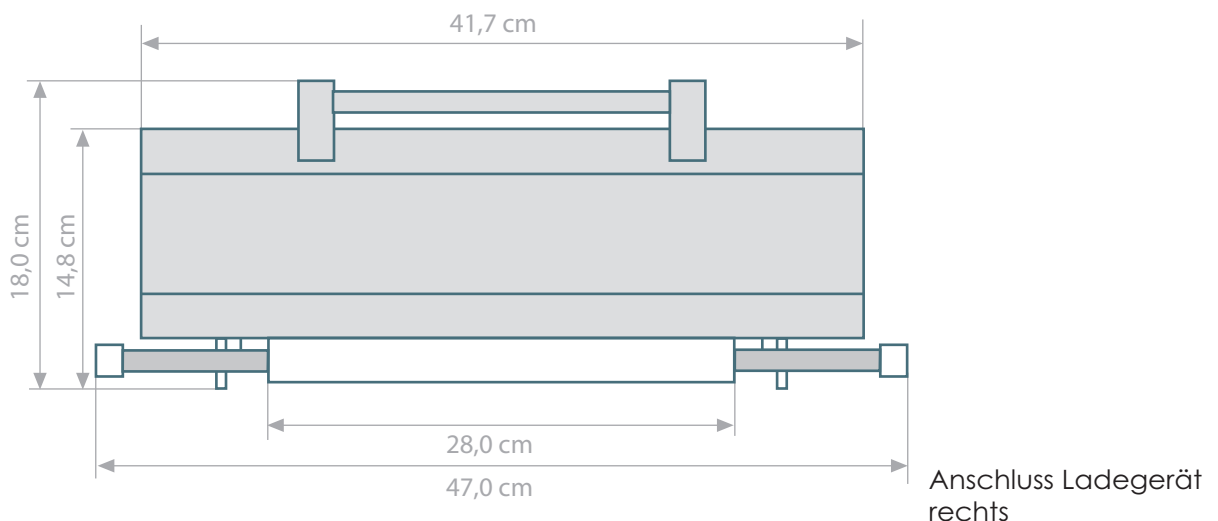


Optional
auch auf der linken
Seite lieferbar

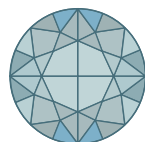



DIAMANTLIFT

Technische Zeichnung

Geräteansicht von rechts / links

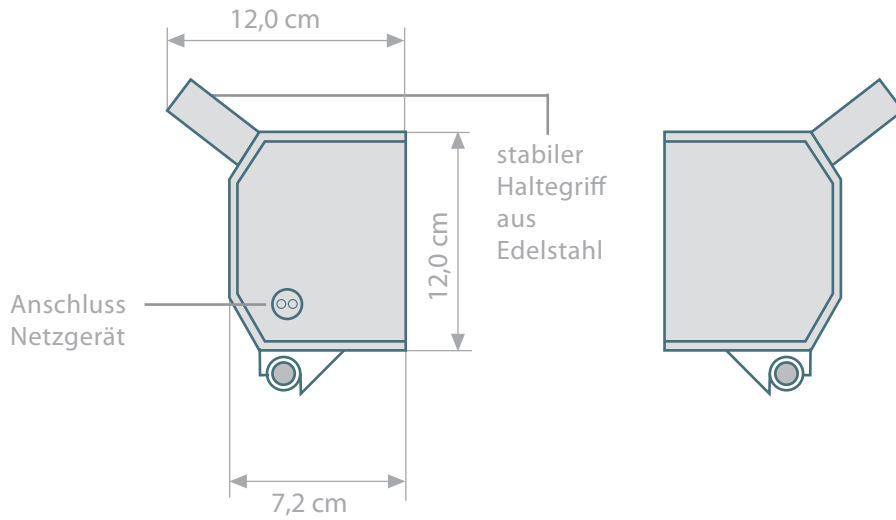

Ansicht Geräteplatte von hinten

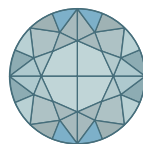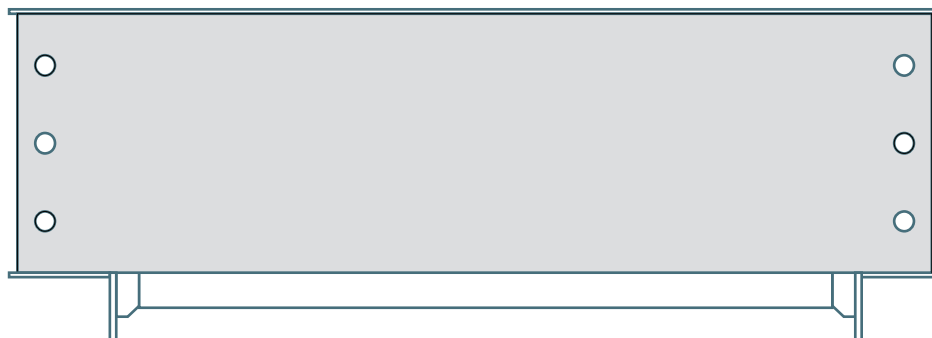

DIAMANTLIFT

Technische Zeichnung

Maßzeichnung Rückseite

Diese Maße dienen nur zur Information. Jedem Lift liegt eine genaue Bohrschablone aus Papier bei. Diese wird einfach an der gewählten Montagestelle des Lifts mit Klebeband befestigt. Das erleichtert die genaue Positionierung der Löcher.



Wichtig: Zur Befestigung reichen 4 feste Schrauben aus - Es müssen also nicht alle Löcher an der Rückseite mit Schrauben an die Wand befestigt werden.

Lieferumfang:

Bohrschablone, 4x Dübel und 4x Schrauben

Zur Montage benötigen Sie:


Inbusschlüssel, Schraubendreher Kreuzschlitz, Ratsche

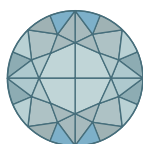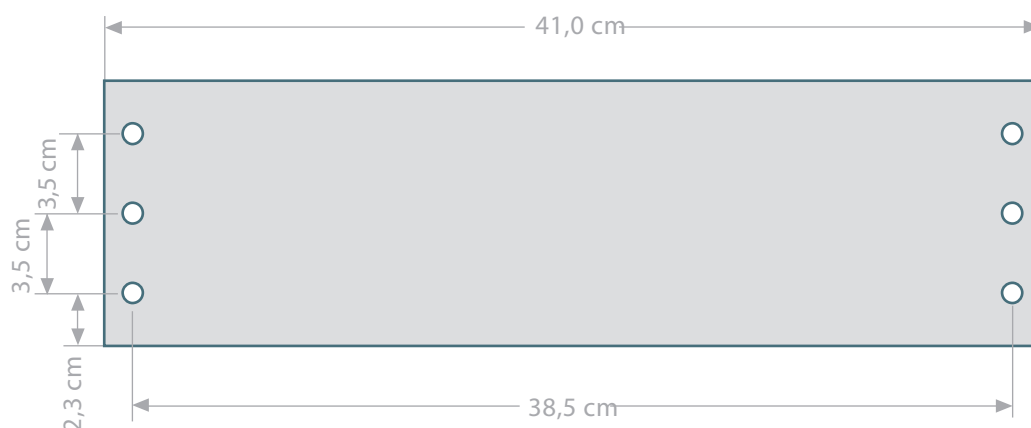

DIAMANTLIFT

Planungshilfe

Und so einfach geht's

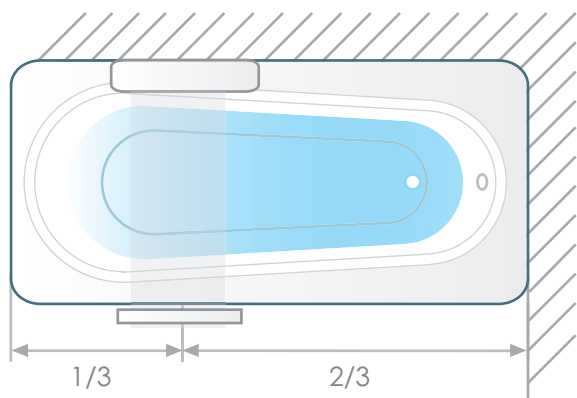


1. Definieren Sie eine geeignete Stelle zur Montage des Lifts über der Wanne. Der Lift sollte so montiert werden, dass eine bequeme Haltung beim Auf- und Abfahren gewährleistet ist. Als Faustformel haben wir herausgefunden, dass dies bei ca. 1/3 der Länge der Badewanne ist. Achten Sie darauf, dass der Einstieg und die Sitzhaltung in der Wanne Ihren Vorstellungen entspricht.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Wand die Belastung des Liftes aushält. Wir empfehlen eine Montage an einer gemauerten Wand (Stein, Beton, Mauerwerk, etc.). Bei Ständerwänden ist eine sichere Befestigung nicht immer möglich!


3. Das Tuch muss gerade aus dem Gerät herauslaufen und an der Bodenschiene / Bodenhalter eingehängt werden können.

Tip: Wir empfehlen den Lift ca. 5,0 cm über dem Wannenrand an der Wand zu montieren!



Sitztuchhalter Typ A

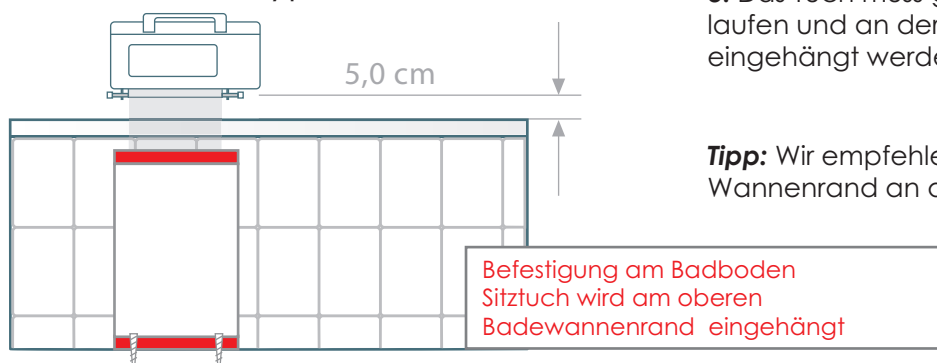

Sitztuchhalter Typ B

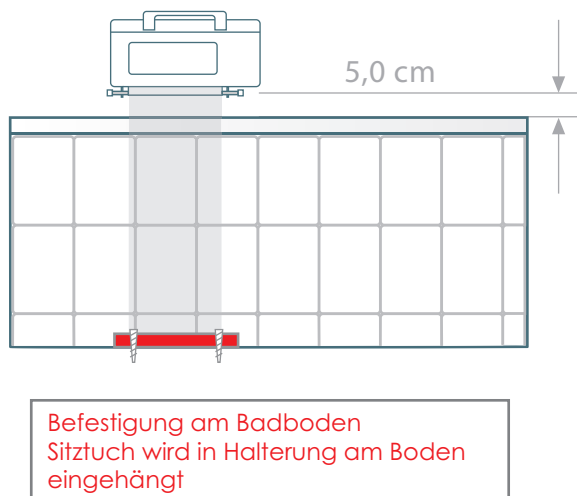


Sitztuchhalter Typ C

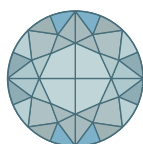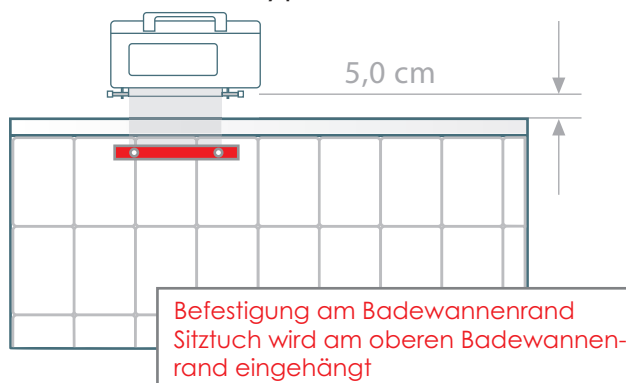

DIAMANTLIFT

Auswahl Sitztuchhalter

Es stehen Ihnen drei Sitztuchhalter zur Auswahl

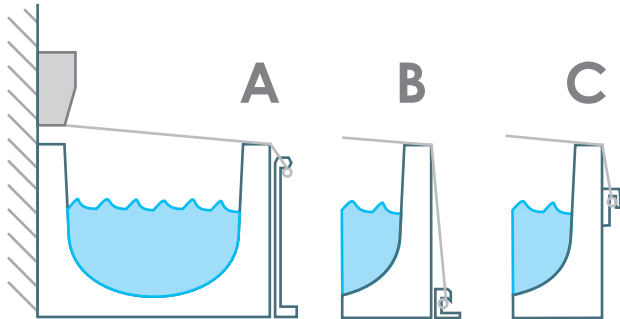

Typ A

Gibt es in 51 cm, 46 cm und 41 cm Höhe und wird am Fußboden befestigt.

Typ B

Wird am Fußboden befestigt.

Typ C

Wird am Badewannenrand befestigt.

Sitztuchhalter Typ A





Abbildung zeigt einen Sitztuchhalter Typ A mit 46 cm am Boden befestigt.

Die richtige Wahl?

So messen Sie richtig: Nehmen Sie einen Maßstab und messen die Höhe der Badewanne. Diesem gemessenen Wert ziehen Sie mindestens 5 cm ab und nehmen die Standardhöhe, die dem Wert am nächsten liegt. (51 cm, 46 cm oder 41 cm)

Beispiel: Ihre Wanne ist vom Boden ab 54 cm hoch. Nach Abzug bleiben 49 cm. Die nächste Standardhöhe wäre dann 46 cm.

Andere Längen fertigen wir Ihnen gerne auf Wunsch gegen einen Mehrpreis.

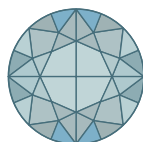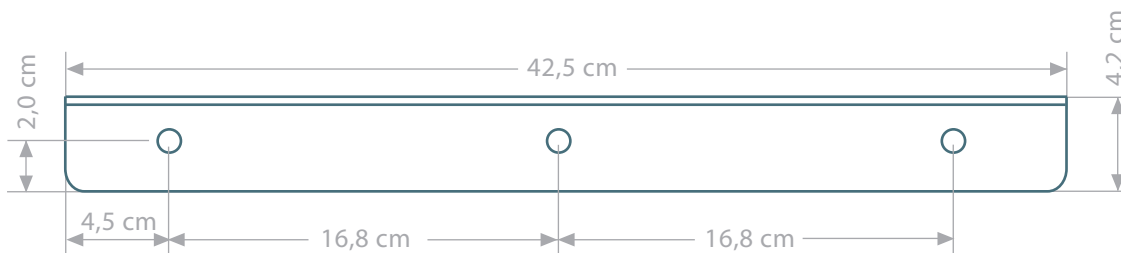

DIAMANTLIFT

Auswahl Sitztuchhalter

Sitztuchhalter Typ B




Abbildung zeigt einen Sitztuchhalter Typ B am Boden befestigt.

Der Sitztuchhalter Typ B kann direkt am Fußboden befestigt werden (siehe Bild links).

Dieser Halter wird kaum sichtbar auf dem Boden montiert. Wenn der Halter bei der Montage mit Silikon zum Boden abgedichtet wird, ist das nasse Aufwischen des Bodens wie gewohnt möglich.

Beachten Sie:

Typ A und B eingeschränkt bei Fußbodenheizung möglich! Bitte überprüfen Sie die Verlegung der Fußbodenheizung

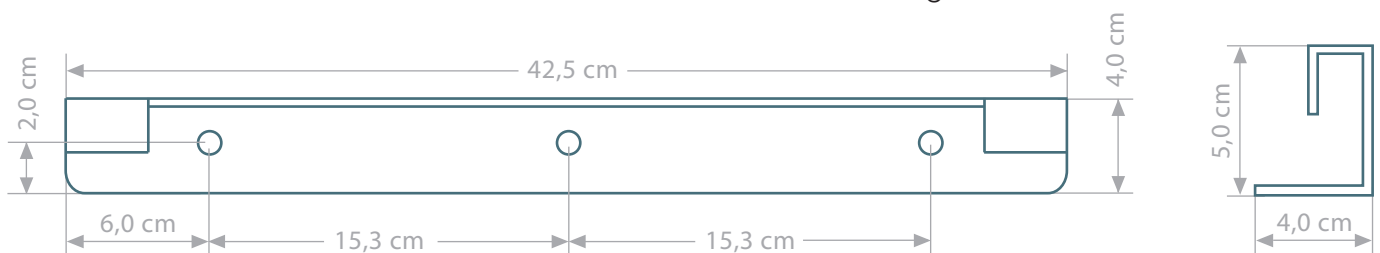

Sitztuchhalter Typ C


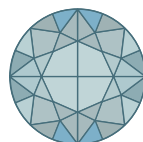


Abbildung zeigt den Sitztuchhalter Typ C an der Wandenwand befestigt.

Der Sitztuchhalter Typ C eignet sich für Badewannen, die eingemauert sind. Dieser Halter kann einfach mit fünf Schrauben an der Seitenwand der Badewanne befestigt werden.

Beachten Sie:


Diese Art der Befestigung ist nicht möglich bei Styropor-Wannenträgern.

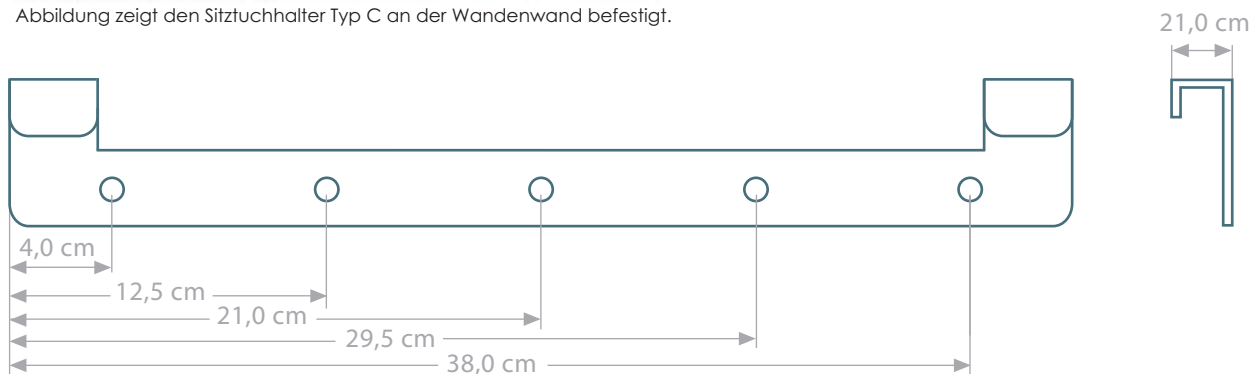

DIAMANTLIFT

Technische Daten

Produktart	Tuchlifter/ Bandlifter Außenhaut Edelstahl Mechanik aus Edelstahl mit lösbarer Befestigung
Einsatzbereich	Baden in liegender und sitzender Haltung Bedienung durch Benutzer Heben und Senken innerhalb der Badewanne
Aufnahmesystem Tuchsitz	Breite Sitztuch ca. 28,0 (cm) Länge Sitztuch ca. 1,7 (m) Hitzebeständig bis 60°C
Hubsystem	elektrisch verstellbar über Tasten (▲) oder (▼) max. Hublast 120 (kg) Einstellbereich 80/100/120 (kg) Motor DC 24V/0,7A (max. 4A) Hubanzahl ca. 40 / je nach Hubhöhe und Gewicht der Person
Elektrische Daten	Akku 2 x 12V/1.2 Ah Bleigel Akku, gasdicht Anschluss Netzteil +15 bis 18V DC Stromaufnahme Standby ca. 0,01 mA / 0,1 mW Ladezeit ca. 24 Std. bei leeren Akkus
Bedienteile	Tastenschalter je nach Ausstattung am Gerät oder über Fernbedienung Ladeanzeige akustisch über Summer, LED an der Fernbedienung
Tragwerk	Klemmbefestigung am Wannenrand / Bodenhalter Breite ca. 42,0 (cm) Höhe 15,0 (cm) Tiefe 7,5 (cm) ohne Haltegriff, 11,0 (cm) mit Haltegriff Gerätegewicht 8,2 (kg) Wannentiefe max. 120 (cm)
Transport und Verpackungsmaß	Länge 67,0 (cm) Breite 50,0 (cm) Höhe 15,0 (cm) Gewicht 11,7 (kg)

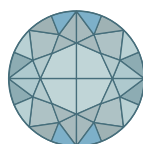

DIAMANTLIFT

Noch Fragen?



Überzeugen Sie sich selbst von der herausragenden Qualität unserer Lifte. In unserem Firmensitz in Karlsruhe (Baden-Württemberg) oder bei unseren Vertriebspartnern können Sie unsere Lifte testen.


Dann klicken Sie doch einfach im Internet auf www.diamantlift.com
Hier können Sie auch bequem von zuhause aus Ihren Lift zusammenstellen und bestellen.

Sollten Sie dabei Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch zur Verfügung.

Wünschen Sie unseren Premiumservice?
Wie Sie sich auch immer entscheiden - wir sind nur einen Anruf weit entfernt und stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

**Sprechen Sie uns an, wenn Sie nicht sicher sind.
Wir erfüllen gerne auch spezielle Wünsche.**

**Telefon +49 721 1834674
E-Mail info@diamantlift.de**

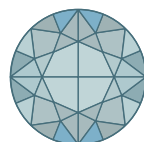

DIAMANTLIFT